



# インプラント外科用器具

プロダクトカタログ



# インプラント外科用器具

---

プロダクトカタログ

|                    |       |
|--------------------|-------|
| インプラント外科用器具／メンテナンス | 1~3   |
| BOSTOME            | 4~6   |
| BOS Trephine Kit   | 7~8   |
| BOS Bone Spreader  | 9~10  |
| BOS Bone Pick      | 11~12 |

# インプラント外科用器具／メンテナンス

## KM マスターコースキット

製造販売元：株式会社 YDM

●インプラント治療に用いる外科用ツールです。



| 製品名                    | 商品No.    | 希望小売価格  |
|------------------------|----------|---------|
| KMニードルホルダー カストロビージョ(C) | CDR00801 | 59,000円 |
| KMゴールドマンフォックス シザーズ     | CDR00802 | 13,200円 |
| KMクラウンシザーズ(C)          | CDR00803 | 5,900円  |
| KMペリオスチール #1           | CDR00804 | 7,500円  |
| KMペリオスチール #2           | CDR00805 | 7,500円  |
| KMチゼルオッセンバイン           | CDR00806 | 7,000円  |
| KM練成充填器                | CDR00807 | 2,000円  |
| KMエキスカベーター             | CDR00808 | 3,400円  |
| KMティッシュプライヤー(有鉤)       | CDR00809 | 8,000円  |
| KM替刃メスハンドル             | CDR00810 | 9,000円  |
| KMマイクロミラーセット           | CDR00811 | 20,900円 |
| KMインスツルメントケース          | CDR00812 | 21,000円 |

(単品合計 164,400円)

| 製品名          | 商品No.    | 希望小売価格   |
|--------------|----------|----------|
| KMマスターコースキット | CDR00800 | 150,000円 |

セット内容：各商品1点(KM替刃メスハンドルのみ2点)



KM ニードルホルダー カストロビージョ(C)



KM ゴールドマンフォックス シザーズ



KM クラウンシザーズ(C)



KM ペリオスチール #1



KM ペリオスチール #2



KM チゼルオッセンバイン



KM 練成充填器



KM エキスカベーター




KM ティッシュプライヤー(有鉤)



KM 替刃メスハンドル



KM マイクロミラーセット  
(KM マイクロハンドル、ミラー 4 種類)

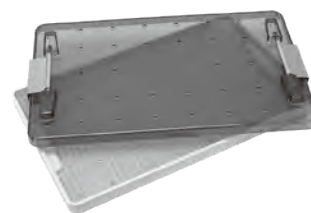

KM インスツルメントケース

## ツール

● GBR テクニックに用いるツールです。

製造販売元：株式会社 YDM

| 製品名                    | 商品No.    | 希望小売価格  |
|------------------------|----------|---------|
| KMデプスメジャー              | CDR00813 | 6,800円  |
| KMボーンキャリア#29           | CDR00814 | 8,500円  |
| KMボーンキャリア#34           | CDR00815 |         |
| ペリオスチール#3              | CDR00816 | 7,500円  |
| オルバンメス                 | CDR00817 | 8,500円  |
| KMニードルホルダースウェーデンタイプ(S) | CDR00818 | 27,000円 |

製造販売元：株式会社 ナカニシ

| 製品名                 | 商品No.    | 希望小売価格  |
|---------------------|----------|---------|
| ソケットリフト ハンドインストルメント | ADC00024 | 15,000円 |

製造販売元：中村デンタル 株式会社

| 製品名                 | 商品No.    | 希望小売価格  |
|---------------------|----------|---------|
| ボーンパイプレーター スターターキット | CDM20220 | 96,000円 |

セット内容：ボーンパイプレーター、ボーンコンデンサー、ボーンエレバーター



KM デプスメジャー



KM ボーンキャリア# 29




KM ボーンキャリア# 34



ペリオスチール# 3



オルバンメス

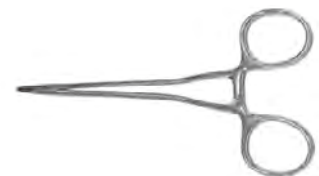


KM ニードルホルダースウェーデンタイプ(S)



ソケットリフト ハンドインストルメント



ボーンパイプレーター

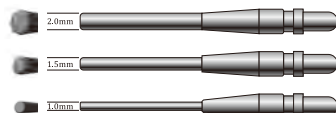

ボーンコンデンサー




ボーンエレバーター

## チタンバー CA ラウンド

製造販売元：株式会社 デンテック

●外科用ハンドピースに装着し、穿孔の起始点・穿孔方向の決定や骨頂の整形などに用います。

(単位：mm)

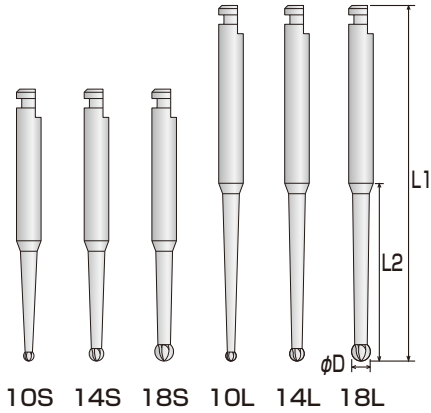

| 製品名             | 商品No.    | ΦD  | L1   | L2   |
|-----------------|----------|-----|------|------|
| チタンバー CAラウンド10S | CDI06500 | 1.0 | 26.0 | 11.5 |
| チタンバー CAラウンド14S | CDI06502 | 1.4 |      |      |
| チタンバー CAラウンド18S | CDI06504 | 1.8 |      |      |
| チタンバー CAラウンド10L | CDI06501 | 1.0 | 34.0 | 17.0 |
| チタンバー CAラウンド14L | CDI06503 | 1.4 |      |      |
| チタンバー CAラウンド18L | CDI06505 | 1.8 |      |      |

梱包形態…6本入(同一サイズ)  
希望小売価格…19,800円

| 製品名              | 商品No.    | 希望小売価格  |
|------------------|----------|---------|
| チタンバー CAラウンドアソート | CDI06506 | 19,800円 |

セット内容：チタンバー CAラウンド10S/14S/18S/10L/14L/18Lの6本組

## チタンブラシ

製造販売元：株式会社 YDM


●補綴物等の清掃・研磨などに使用します。



KM64 チタンブラシ CONE

| 製品名             | 商品No.    | 希望小売価格  |
|-----------------|----------|---------|
| KM64チタンブラシ CONE | CDI08000 | 19,800円 |
| KM64チタンブラシ FLAT | CDI08001 |         |

梱包形態…3本入

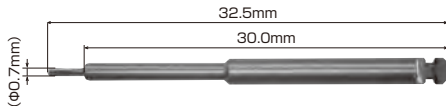

KM64 チタンブラシ FLAT

## Osteotome

製造販売元：京セラ株式会社

●歯槽骨頂部から上顎洞底までの垂直的な骨の厚みが薄い場合に行う、上顎洞底挙上術（ソケットリフト）に用います。




ストレート・タイプ



カーブド・タイプ

| 製品名            | 商品No.    | 希望小売価格  |
|----------------|----------|---------|
| BOSオステオーム2-16S | CDR00150 | 14,000円 |
| BOSオステオーム2-22S | CDR00160 |         |
| BOSオステオーム2-28S | CDR00170 |         |
| BOSオステオーム2-33S | CDR00180 |         |
| BOSオステオーム2-40S | CDR00182 |         |
| BOSオステオーム2-43S | CDR00184 |         |

| 製品名            | 商品No.    | 希望小売価格  |
|----------------|----------|---------|
| BOSオステオーム2-16C | CDR00250 | 16,000円 |
| BOSオステオーム2-22C | CDR00260 |         |
| BOSオステオーム2-28C | CDR00270 |         |
| BOSオステオーム2-33C | CDR00280 |         |
| BOSオステオーム2-40C | CDR00282 |         |
| BOSオステオーム2-43C | CDR00284 |         |

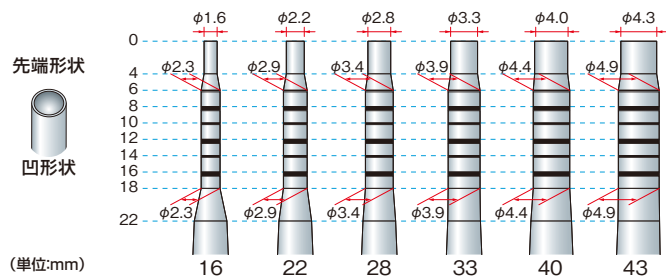

# Ridge Expander

製造販売元：京セラ株式会社

●主に前歯部等で骨幅が唇、頬舌的に少ない場合、骨幅の拡張を行う際に用います。




ストレート・タイプ



カーブド・タイプ

| 製品名               | 商品No.    | 希望小売価格  |
|-------------------|----------|---------|
| BOSリッジエキスパンダ2-15S | CDR00050 | 14,000円 |
| BOSリッジエキスパンダ2-21S | CDR00060 |         |
| BOSリッジエキスパンダ2-26S | CDR00070 |         |
| BOSリッジエキスパンダ2-31S | CDR00080 |         |
| BOSリッジエキスパンダ2-36S | CDR00090 |         |
| BOSリッジエキスパンダ2-41S | CDR00100 |         |

| 製品名               | 商品No.    | 希望小売価格  |
|-------------------|----------|---------|
| BOSリッジエキスパンダ2-15C | CDR00350 | 16,000円 |
| BOSリッジエキスパンダ2-21C | CDR00360 |         |
| BOSリッジエキスパンダ2-26C | CDR00370 |         |
| BOSリッジエキスパンダ2-31C | CDR00380 |         |
| BOSリッジエキスパンダ2-36C | CDR00390 |         |
| BOSリッジエキスパンダ2-41C | CDR00400 |         |

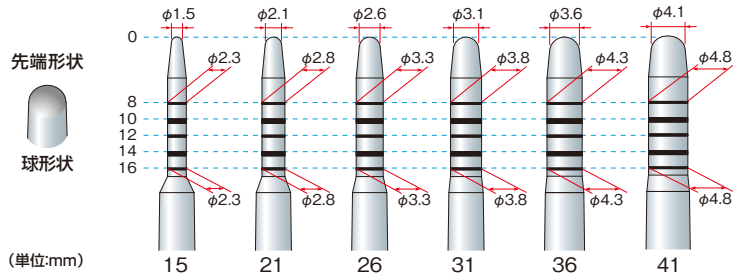

# Osteotome-G (BOSTOME-G)


製造販売元：京セラ株式会社

●歯槽骨頂部から上顎洞底までの垂直的な骨の厚みが薄い場合に行う、上顎洞底挙手術（ソケットリフト）に用います。



| 製品名              | 商品No.    | 希望小売価格  |
|------------------|----------|---------|
| BOSオステオトームG-32C  | CDR00188 | 16,000円 |
| BOSオステオトームG-37C  | CDR00190 |         |
| BOSオステオトームG-42C  | CDR00192 |         |
| BOSオステオトームG-47C  | CDR00194 |         |
| ★BOSオステオトームG-52C | CDR00196 |         |

★受注生産品となります。

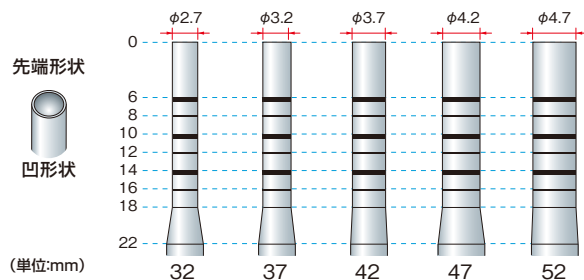



## Ridge Expander-G (BOSTOME-G)


製造販売元：京セラ株式会社

●主に前歯部等で骨幅が唇、頬舌的に少ない場合、骨幅の拡幅を行う際に用います。




| 製品名                | 商品No.    | 希望小売価格  |
|--------------------|----------|---------|
| BOSリッジエキスパンダG-27C  | CDR00540 | 16,000円 |
| BOSリッジエキスパンダG-32C  | CDR00550 |         |
| BOSリッジエキスパンダG-37C  | CDR00560 |         |
| BOSリッジエキスパンダG-42C  | CDR00570 |         |
| BOSリッジエキスパンダG-47C  | CDR00580 |         |
| ★BOSリッジエキスパンダG-52C | CDR00590 |         |

★受注生産品となります。

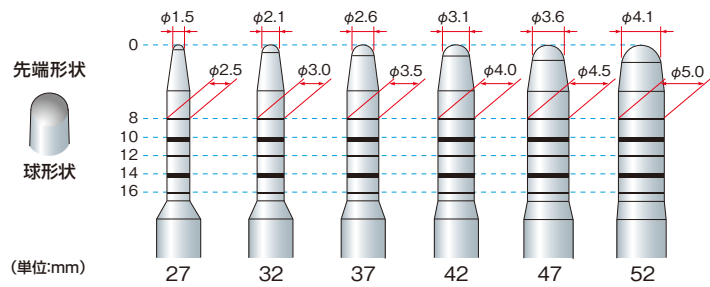

## Bostome-IXY

製造販売元：株式会社 デンテック

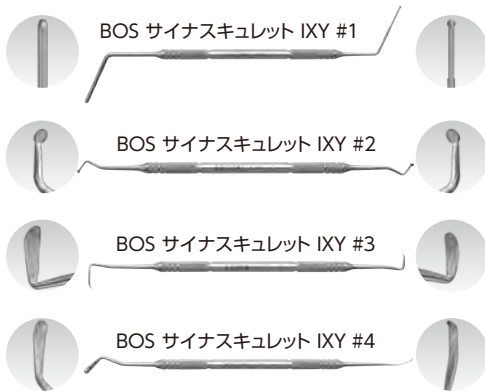

| 製品名                  | 商品No.    | 希望小売価格  |
|----------------------|----------|---------|
| BOS サイナスキュレット IXY #1 | CDR00610 | 20,000円 |
| BOS サイナスキュレット IXY #2 | CDR00620 |         |
| BOS サイナスキュレット IXY #3 | CDR00630 |         |
| BOS サイナスキュレット IXY #4 | CDR00640 |         |

# BOS Trepine Kit

## BOS Trepine Kit


製造販売元：京セラ株式会社

●骨採取やフィクスチャー抜去、インプラント窩形成に用います。



| 製品名          | 商品No.    | 希望小売価格  |
|--------------|----------|---------|
| アダプタドライバー    | CDI06550 | 5,800円  |
| ボーンプッシャー     | CDI06555 | 5,800円  |
| マーキングシャフト    | CDI06560 | 10,500円 |
| ストッパーシャフト#16 | CDI06565 | 8,900円  |
| ストッパーシャフト#14 | CDI06570 |         |
| ストッパーシャフト#12 | CDI06575 |         |
| ストッパーシャフト#10 | CDI06580 |         |
| ストッパーシャフト#8  | CDI06585 |         |
| ストッパーシャフト#6  | CDI06588 |         |
| BOSTレフィンバー#1 | CDI06590 | 9,900円  |
| BOSTレフィンバー#2 | CDI06595 |         |
| BOSTレフィンバー#3 | CDI06600 |         |
| BOSTレフィンバー#4 | CDI06605 |         |
| BOSTレフィンバー#5 | CDI06610 |         |
| BOSTレフィンバー#6 | CDI06615 |         |

### System Configuration

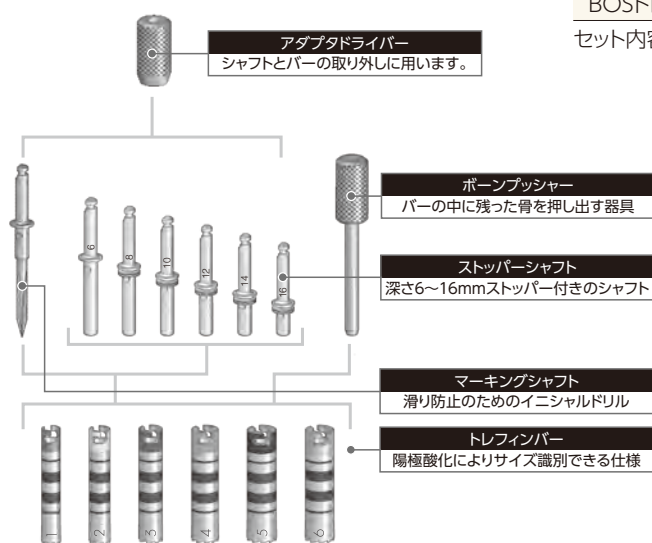


| 製品名           | 商品No.    | 希望小売価格  |
|---------------|----------|---------|
| BOSTレフィンバーキット | CDI06625 | 59,800円 |

セット内容：アダプタドライバー、ボーンプッシャー、マーキングシャフト、ストッパーシャフト #16、BOSTレフィンバー #3/#4/#5/#6 (単品合計 70,600円)

### Trepine Size

|       | Tr#1  | Tr#2   | Tr#3 | Tr#4  | Tr#5 | Tr#6 |
|-------|-------|--------|------|-------|------|------|
| Inner | 2.8   | 3.3    | 3.8  | 4.3   | 4.8  | 5.3  |
| Outer | 3.3   | 3.8    | 4.3  | 4.8   | 5.3  | 5.8  |
| Color | Brown | Yellow | Pink | Green | Blue | Gold |


マーキングシャフト、ストッパーシャフトについて、お使いのマイクロモーターのコントラヘッド【ヘッド内寸法】が12mm以上ある場合は下記Lサイズをご使用ください。

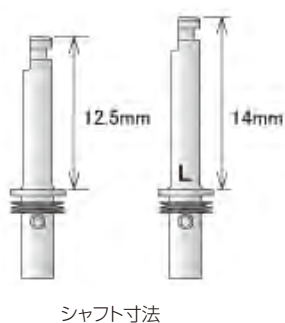

| 製品名           | 商品No.    | 希望小売価格  |
|---------------|----------|---------|
| マーキングシャフトL    | CDI06561 | 10,500円 |
| ストッパーシャフト#16L | CDI06566 | 8,900円  |
| ストッパーシャフト#14L | CDI06571 |         |
| ストッパーシャフト#12L | CDI06576 |         |
| ストッパーシャフト#10L | CDI06581 |         |
| ストッパーシャフト#8L  | CDI06586 |         |
| ストッパーシャフト#6L  | CDI06589 |         |

■ Surgical Procedure

トレフィンバー#3 / ストッパーシャフト#12の使用例

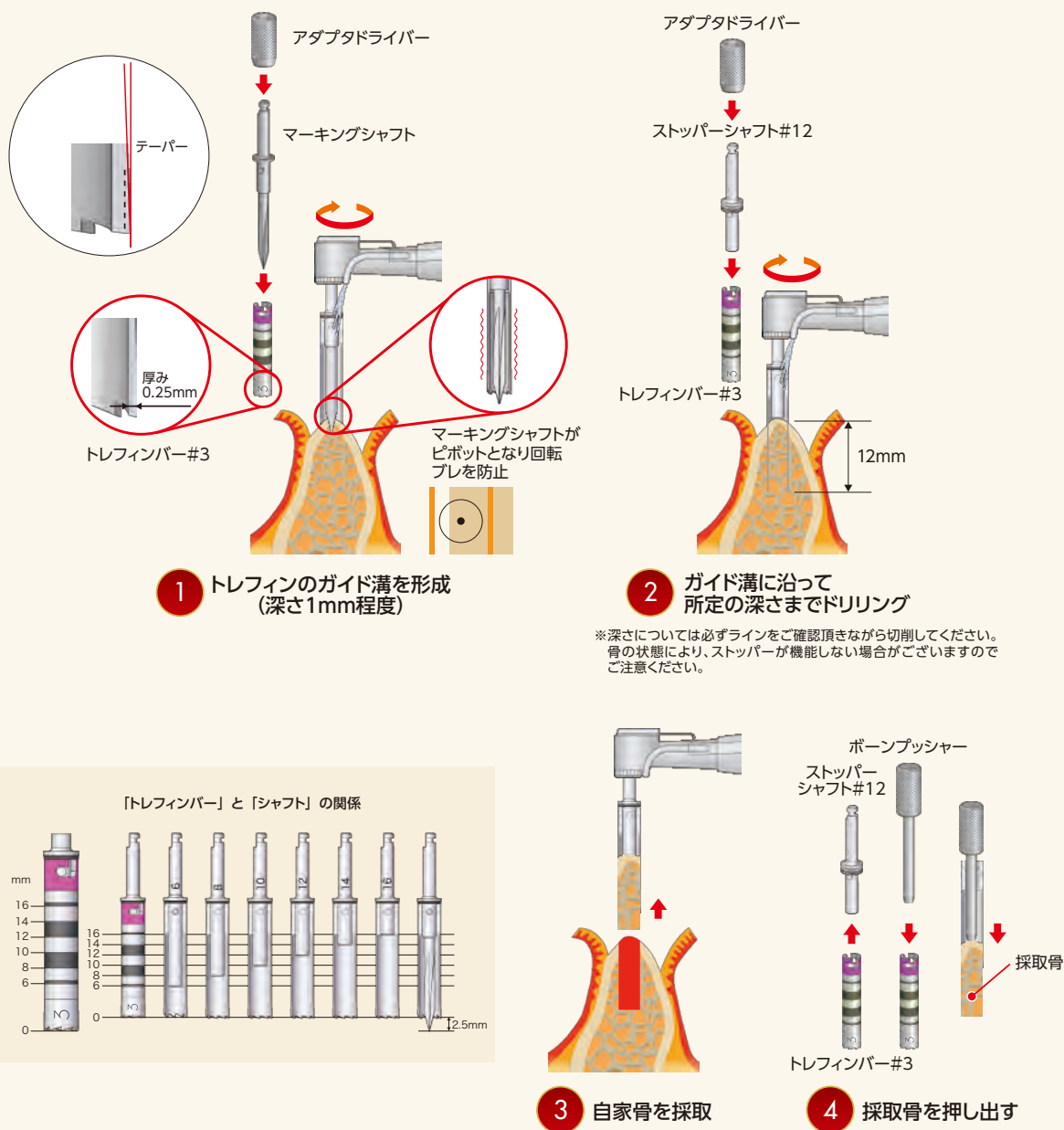

BOS Trephine Case

製造販売元：京セラ株式会社



| 製品名         | 商品No.    | 希望小売価格  |
|-------------|----------|---------|
| BOSトレフィンケース | CDI06620 | 16,000円 |


・掲載価格はケース本体のもので、収納されている器具の価格は含まれておりません。

# BOS Bone Spreader

## BOS Bone Spreader

製造販売元：京セラ株式会社

●少ない衝撃で骨を押し広げながら「脆弱骨の緻密化」・「骨幅の拡幅」を行う際に用います。

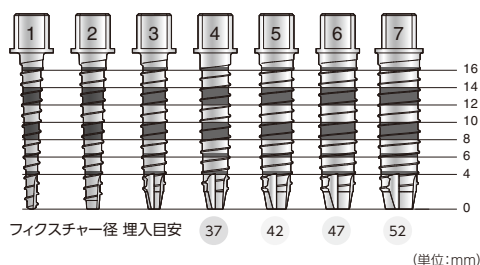

| 製品名            | 商品No.    | 希望小売価格  |
|----------------|----------|---------|
| BOSボーンスプレッダー#1 | CDR00651 | 12,000円 |
| BOSボーンスプレッダー#2 | CDR00652 |         |
| BOSボーンスプレッダー#3 | CDR00653 |         |
| BOSボーンスプレッダー#4 | CDR00654 |         |
| BOSボーンスプレッダー#5 | CDR00655 |         |
| BOSボーンスプレッダー#6 | CDR00656 |         |
| BOSボーンスプレッダー#7 | CDR00657 |         |

| 製品名             | 商品No.    | 希望小売価格  |
|-----------------|----------|---------|
| BOSボーンスプレッダーセット | CDR00650 | 49,800円 |

セット内容：BOSボーンスプレッダー#1/#2/#3/#4/#5の5本組  
(単品合計 60,000円)


### φ Size (Head & Body)

(単位:mm)

|          | 骨内長 | #1  | #2  | #3  | #4  | #5  | #6  | #7  |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| φ (head) | —   | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| φ (body) | 8   | 2.1 | 2.5 |     |     |     |     |     |
|          | 10  | 2.2 | 2.6 |     |     |     |     |     |
|          | 12  | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 4.9 |
|          | 14  | 2.5 | 2.9 |     |     |     |     |     |
|          | 16  | 2.6 | 3.1 |     |     |     |     |     |

## BOS Spreader Case

製造販売元：京セラ株式会社

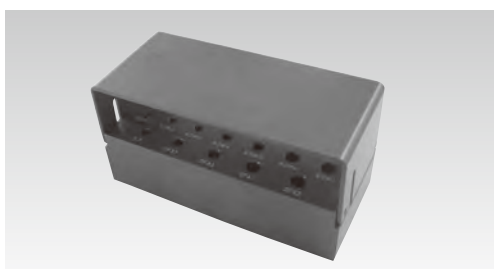


| 製品名          | 商品No.    | 希望小売価格  |
|--------------|----------|---------|
| BOSスプレッダーケース | CDR00658 | 20,000円 |


■ Surgical Procedure

目安の回転数: 1分間800rpm


1 Marking Bur

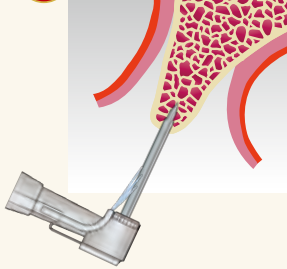

2 Drill Contra #16

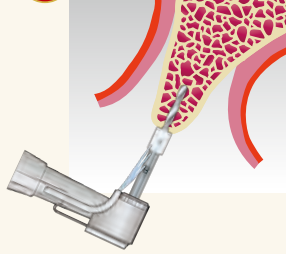


3 Trial Pin

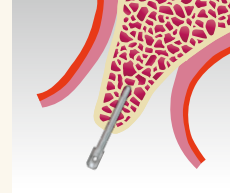


目安の回転数: 1分間20rpm

4 Bone Spreader #1

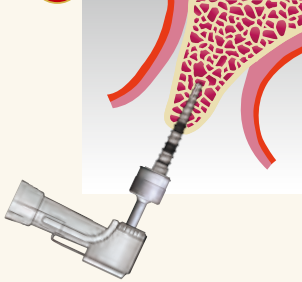


5 Bone Spreader #2

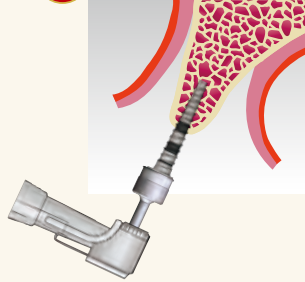


#3以降、トルクレンチにて拡大


6 Bone Spreader #3

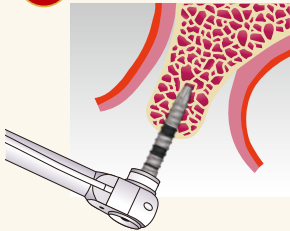


7 Bone Spreader #4

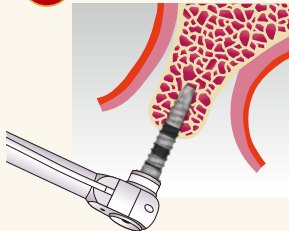

8 Screw Former TP 37\*

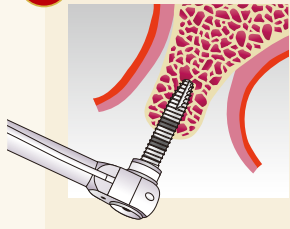

9 POI 37-10TP-S

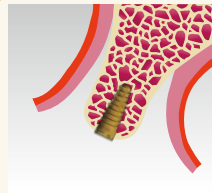

\*脆弱骨症例以外、通常の骨質・硬い骨質においては使用


Provided by Dr.Tetsuji Takahashi

# BOS Bone Pick

## BOS Bone Pick


製造販売元：京セラ株式会社

● Bone Spreader にて対応が困難な骨幅が狭いケースに適用

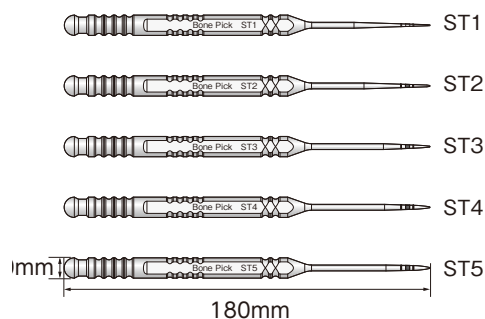

ストレート・タイプ

| 製品名            | 商品No.    | 希望小売価格  |
|----------------|----------|---------|
| BOS ボーンピック ST1 | CDR00720 | 14,000円 |
| BOS ボーンピック ST2 | CDR00721 |         |
| BOS ボーンピック ST3 | CDR00722 |         |
| BOS ボーンピック ST4 | CDR00723 |         |
| BOS ボーンピック ST5 | CDR00724 |         |

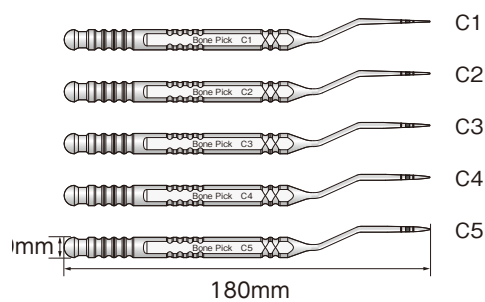


カーブド・タイプ

| 製品名           | 商品No.    | 希望小売価格  |
|---------------|----------|---------|
| BOS ボーンピック C1 | CDR00725 | 16,000円 |
| BOS ボーンピック C2 | CDR00726 |         |
| BOS ボーンピック C3 | CDR00727 |         |
| BOS ボーンピック C4 | CDR00728 |         |
| BOS ボーンピック C5 | CDR00729 |         |

### 先端サイズ

(単位：mm)

| 骨内長 | ST1/C1 | ST2/C2 | ST3/C3 | ST4/C4 | ST5/C5 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8   | 1.00   | 1.32   | 1.60   | 2.00   | 2.40   |
| 10  | 1.13   | 1.45   | 1.77   | 2.12   | 2.47   |
| 12  | 1.26   | 1.58   | 1.95   | 2.25   | 2.55   |
| 14  | 1.39   | 1.71   | 2.12   | 2.37   | 2.62   |

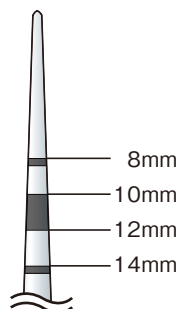


## ■ Surgical Procedure

例：37-TPの場合

### ステップ1：皮質骨穿孔

〔バリオサージチップ：  
SG15A or SG15C推奨〕

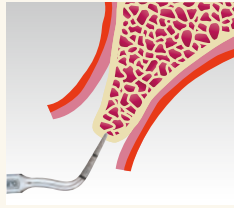


### ステップ2：皮質骨拡大

Bone Pick#1～5を用いて、  
順次拡大




### ステップ3：骨幅拡大

Bone Spreader#1～4を用いて、  
順次拡大

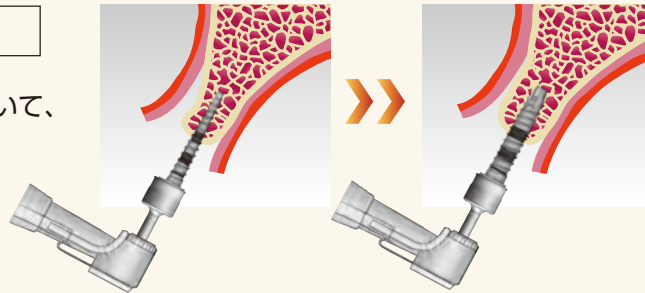


### ステップ4：タップ形成

Screw Former

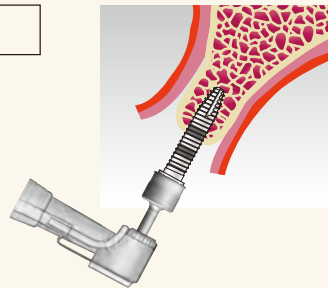

### ステップ5：埋入

フィクスチャー埋入

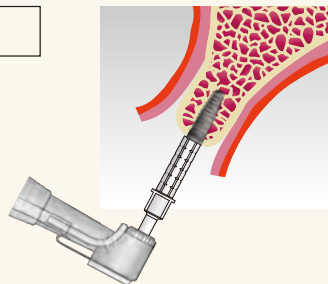

|                         |  |                       |  |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| KM ニードルホルダーカストロビージョ (C) | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000630D017】 | KM オルバンメス             | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000634D104】 |
| KM ゴールドマンフォックスシザーズ      | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000635D204】 | KM ニードルホルダースウェーデンパターン | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000630D019】 |
| KM クラウンシザーズ (C)         | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000635D102】 | チタンバー CA ラウンド         | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 13B2X00094000137】 |
| KM ペリオスチール              | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000642D031】 | KM64 チタンブラシ           | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000609D001】 |
| KM チゼルオッセンバイン           | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000641D008】 | BOS 外科手術用器具           | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 26B1X10012103101】 |
| KM 練成充填器                | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000665D622】 | BOS サイナスキュレット IXY     | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 13B2X00094000003】 |
| KM エキスカペーター             | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000662D310】 | BOS トレフィンキット          | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 26B1X10012104106】 |
| KM ティッシュプライヤー (有鉤)      | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000636D022】 | BOS ボーンスプレッダー         | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 26B1X10012101106】 |
| KM 替刃メスハンドル             | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000634D009】 | ソケットリフト ハンドインストルメント   | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 09B2X00016000141】 |
| KM マイクロミラーセット           | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000625D016】 | ストリップングコントラアングル       | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 225ALBZX00008000】 |
| KM デプスマジャー              | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000658D124】 | ボーンコンデンサー             | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 13B2X00108000013】 |
| KM ボーンキャリア              | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 11B1X1000658D125】 | ボーンエレベーター             | 【医療機器承認 / 認証 / 届出番号: 13B2X00108000014】 |



## 京セラ株式会社

メディカル事業部 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501

Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 1-Sビル 〒140-8810  
Tel:03-5782-7018 Fax:03-5782-8518

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001  
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

名古屋営業所 名古屋市東区葵3丁目15-31(住友生命千種ニュータワービル6F) 〒461-0004  
Tel:052-930-1480 Fax:052-938-1388

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003  
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826  
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト7F) 〒812-0013  
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177

ver.1.0